

Reinigungs- und Pflegeanleitung

doctorseyes Wangenabhalter



doctorseyes Wangenabhalter sind Medizinprodukte der Klasse 1 mit einer sehr glatten Oberfläche. Material: *Transparenter Kunststoff Polypropylen(PP) oder Polycarbonat (PC)*.

Grundsätzlich gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Instrumentenreinigung. Bitte beachten Sie jedoch diese Reinigungs- und Pflegeanweisungen um Schäden an Ihrem doctorseyes Wangenabhalter zu vermeiden. Befolgen Sie diese Pflegehinweise und verwenden Sie die Wangenabhalter ordnungsgemäß, um Materialschäden zu vermeiden.

Sterilisation/Desinfektion

Im Allgemeinen ist es nicht notwendig, unsere Wangenabhalter mit Autoklaven zu sterilisieren. Wir empfehlen zum Beispiel eine Wischdesinfektion mit geeigneten Desinfektionsmitteln wie ID 212 forte, BIB forte oder Lysetol. Bitte genaue Konzentration verwenden, wie vom Hersteller empfohlen. Die Behandlungsdauer ist ebenfalls wie vom Hersteller empfohlen durchzuführen. Wichtig: Verwenden Sie kein aggressives oder saures Desinfektionsmittel, wie es für Instrumente verwendet wird.

Zur Ihrer Information: Wir haben strenge Hygienegesetze in Deutschland, aber die meisten Zahnärzte sterilisieren Wangenabhalter nur mit Standard-desinfektionsmittel. Wegen der sehr glatten Oberfläche ist dies ein sehr sicheres Verfahren.

Pflegehinweise

- doctorseyes Wangenabhalter können in einem Thermodesinfektor bis 90 °C und im Autoklav bis 120°C behandelt werden.

- Bei Bedarf Ablagerungen mit einem milden Reinigungsmittel oder weichem Tuch entfernen. Verwenden Sie keine harten Bürsten, raue und kratzende Schwämme oder Ähnliches.

- Bitte legen Sie, falls notwendig, die Wangenabhalter sofort nach Gebrauch in eine Desinfektionslösung und reinigen Sie diese sofort, um verkrustete, klebende Ablagerungen zu vermeiden.

- Nach dem Autoklavieren abwarten, bis der Autoklav wie im Handbuch beschrieben abgekühlt ist.

- Die Wangenabhalter mit einem fusselfreien Tuch trocknen.

Wichtig zur Vermeidung von Kalkbelägen und Einbrennungen

doctorseyes Wangenabhalter müssen mit sauberem Wasser gereinigt werden! Wenn für die Reinigung Leitungswasser verwendet wird, die Wangenabhalter danach unbedingt gut trockenreiben.

Bei der Verwendung des Thermodesinfektors ist darauf zu achten, dass dieser richtig entkalkt ist!

Vermeiden Sie kurze Reinigungsprogramme mit hohen und schnellen Temperaturveränderungen.

doctorseyes

Abteistrasse 28

88416 Ochsenhausen

phone: +49 7352 9392-12

Email: info@doctorseyes.de

Homepage: www.doctorseyes.de